

Návod na odber vzorky a zasielanie ionizovaného vápnika

Dôležité pozadie:

Kontakt so vzduchom mení koncentráciu ionizovaného vápnika!

→ zabrániť kontaktu so vzduchom

Potrebný materiál:

2 striekačky

2 vákuové skúmavky na sérum (napr. Vacutainer), ktoré **neboli** otvorené!!

ihly

centrifúga

Postup:

1. Ihlou s nasadenou striekačkou odobrať krv zo žily
2. Prepichnúť gumovú zátku vákuovej sérovej skúmavky a krv jemne vstreknúť dovnútra
3. Nechať zraziť
4. Scentrifugovať
5. Gumovú zátku prepichnúť ihlou s nasadenou striekačkou, opatrne natiahnúť odstredenú sérum (nesmú tam byť bunky a vzduchové bubliny)
6. Sérum opatrne vstreknúť do novej sérovej vákuovej skúmavky prepichnutím gumovej zátky
7. Skúmavku zabalíť a zaslať

Prosíme na žiadanku veľkým písmom najlepšie červenou farbou zaznačiť do Anamnéza/požiadavky:
ionizovaný vápnik

Alternatíva:

Pokiaľ sú dispozícii sérové skúmavky s gélom, je možné vynechať krok 5 a 6.

So srdečným pozdravom,
tím LABOKLINu s. r. o.